


Danis Procedure Pack

SX-ELLA Stent Danis

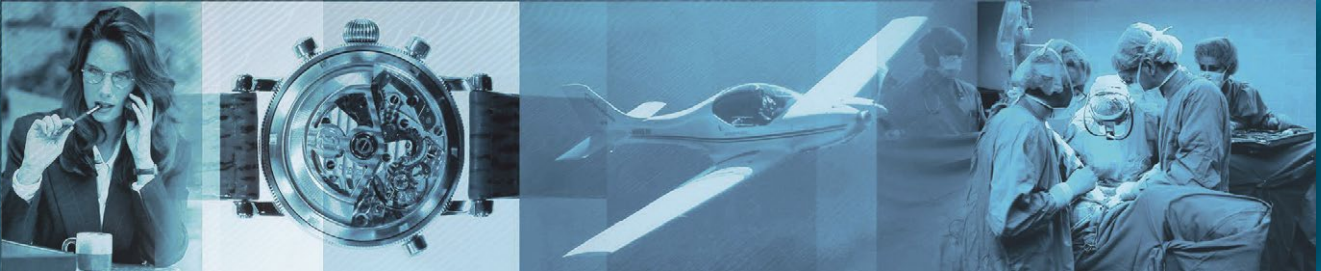

Danis




Stentsystem für die Behandlung von blutenden Ösophagusvarizen

Einfache Anwendung ohne den Bedarf einer Endoskopie / Röntgenkontrolle

Sichere Hämostase durch direkte Kompression der Varizen

Ermöglichung der peroralen Aufnahme nach der Stentimplantation

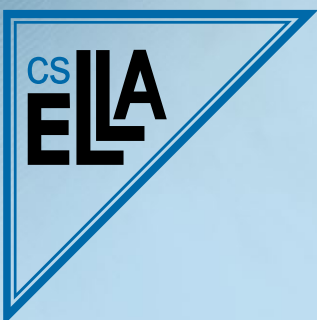

Beschreibung

Procedure Pack mit dem SX-ELLA Stent Danis

Selbst-expandierbarer Nitinolstent, der in dem zum Gebrauch vorbereiteten Einführsystem geladen ist. Komplettes Procedure Pack beinhaltet alle Artikel, die für die Anwendung notwendig sind.

Indikationen

SX-ELLA Stent Danis ist dazu gedacht, akute Blutungen aus Oesophagusvarizen zu stoppen. Im Fall von massiven schwer bewältigenden Oesophagusvarizenblutungen kann der Stent auch als eine Alternativoption zu einer frühen TIPS oder zur Ballontamponade eingesetzt werden.

Kontraindikationen

Strikturen des Ösophagus
Kürzliche Radiotherapie des Ösophagus
Tumoren des oberen Teils des Atmungstrakts, Ösophagus oder Magens
Obere gastrointestinale Blutung verursacht durch andere Ursachen (z.B. Perforation)

Eigenschaften / Vorteile

- ☑ Variable Abstände im Weben des Stents, um sich an die Peristaltik anzupassen / Reduktion der Migrationsrate
- ☑ Standardisierte Kompression der Varizen garantiert effektive Hämostase
- ☑ Atraumatische Stent-Enden
- ☑ Röntgendichte Markierungen an beiden Stent-Enden und in der Mitte / akkurate Stentpositionierung
- ☑ Metalldrahtschlingen aus einer spezifischen medizinischen Legierung an beiden Stent-Enden / Hohe mechanische Haltbarkeit und Widerstand gegen Säure
- ☑ Einfaches endoskopisches Entfernen des Stents nach 7 Tagen

Vorteile des Verfahrens

- ☑ Sofort implantierbar ohne Endoskopie / Röntgenkontrolle, auch in Notsituationen
- ☑ Patient kann direkt nach der Stentimplantation Nahrung oral zu sich nehmen

Zusätzliche Informationen

Danis Procedure Pack (019-08S-25-135) besteht aus einem Kunststoffkoffer, der alle Artikel enthält, die für die Anwendung notwendig sind: Einführsystem geladen mit dem Stent, Führungsdraht, Injektionsspritzen, Mundstück, Nierenschale, Papierschürze, Abfallbeutel mit Clip, sterile Handschuhe




Danis Procedure Pack Basic (019-08S-25-135-B) besteht aus: Einführsystem geladen mit dem Stent, Führungsdraht, Injektionsspritze 50 ml

Das Einführsystem hat einen Durchmesser von 9,4 mm (28 F) / 6,6 mm (20 F) und ist in der Standardlänge von 60 cm verfügbar



Verfügbare Größe

REF Nr.	SX-ELLA Stent Danis			Einführsystem	
	Durchmesser der Tulpen [mm]	Durchmesser des Stents [mm]	Nominale Stentlänge [mm]	Aktivlänge [cm]	Aussendurchmesser [F]
019-08S-25-135	30	25	135	60	28 / 20
019-08S-25-135-B	30	25	135	60	28 / 20

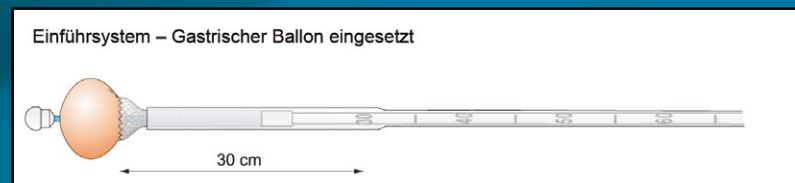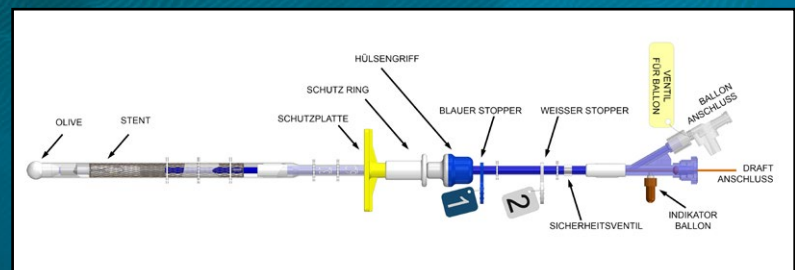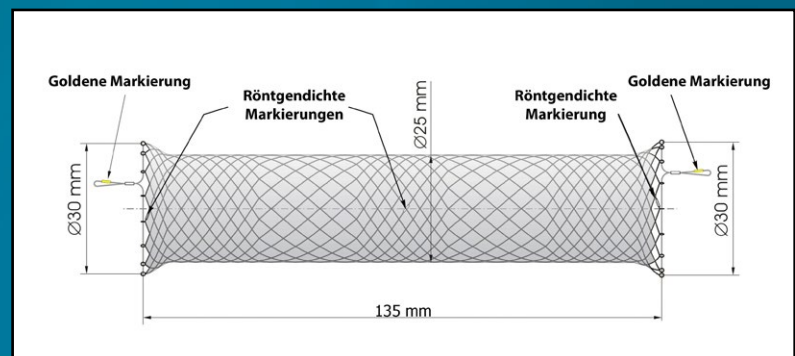

Distributor:

Hersteller:

ELLA-CS, s.r.o.

Milady Horakove 504/45, Trebes
500 06 Hradec Kralove, Tschechische Republik

Tel.: +420 495 279 111 Fax: +420 495 265 655
E-mail: info@ellacs.eu URL: www.ellacs.eu